

Soratindex Dr. Michaels Kondicionér

příbalová informace zdravotnického prostředku



Co byste měli vědět přípravku SORATINDEX DR. MICHAELS KONDICIONÉR

Tento příbalový leták informuje uživatele o přínosech a možných rizicích při užívání SORATINDEX DR. MICHAELS KONDICIONÉR. Uschovejte tento letáček spolu s obalem k pozdějšímu nahlédnutí. Vždy pozorně čtete informace pro použití a vezměte na vědomí všechna upozornění. Používejte SORATINDEX DR. MICHAELS ŠAMPÓN jen do uplynutí vyznačené doby použitelnosti data spotřeby. Prostředek nikdy neředte, ani je nemíchejte s jinými produkty. Prostředek nanášejte vždy pouze čistýma rukama nebo aplikátorem, který je pravidelně pečlivě umyt mýdlem nebo jemným čistícím prostředkem. Jestliže k nanášení prostředku používáte aplikátory, ujistěte se, že budou vždy po použití umyty a nechte je vždy před dalším použitím úplně vysušit. Prostředek s nikým jiným nesdílejte.

K čemu se SORATINDEX DR. MICHAELS KONDICIONÉR používá?

SORATINDEX DR. MICHAELS KONDICIONÉR se používá k péči o suchou, odlupující se a zanícenou pokožku postiženou lupénkou nebo atopickým exémem ve vlasové části a ke zmírnění šupinatění způsobených lupénkou. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje používat všechny produkty obsažené v sadě SORATINDEX DR. MICHAELS SADA NA VLASOVOU POKOŽKU, tedy SORATINDEX DR. MICHAELS KRÉM 50G v kombinaci s produkty SORATINDEX DR. MICHAELS ŠAMPÓN a SORATINDEX DR. MICHAELS Kondicionér, protože se vzájemně doplňují.

Použití prostředku

DR. MICHAELS KONDICIONÉR, se používá v posledním kroku celé kúry. Hydratuje a chrání ošetřená místa. Kondicionér jemně vmasírujte do pokožky a nechte zaschnout. Poté jemně opláchněte a vlasy vysušte.

Než začnete prostředek používat

Než začnete používat prostředek SORATINDEX DR. MICHAELS KONDICIONÉR, VŽDY před použitím nejdříve vyzkoušejte malé množství produktu na malé ploše pokožky, jako test na možné reakce, obzvláště budete-li produkt používat na citlivých místech pokožky. Ponechte na pokožce působit 24-48 hodin, až poté smyjte. Pokud se objeví jakákoliv reakce, prosíme, ihned kontaktujte výrobce. Pokud žádnou reakci nemáte, aplikujte SORATINDEX DR. MICHAELS KONDICIONÉR dle návodu k použití.

Dodržujte doporučenou frekvenci používání:

Jestliže budete prostředek SORATINDEX DR. MICHAELS SADA NA VLASOVOU POKOŽKU používat méně často, než byste měli, je možné, že nebude mít tak dobré účinky a potíže se suchou, odlupující se a zanícenou pokožkou mohou přetrvávat. Pokud budete používat produkt častěji, než byste měli, potíže se suchou, odlupující se a/nebo zanícenou kůží neustanou rychleji, naopak, pokožku můžete ještě více podráždit.

Upozornění

Není určeno pro děti mladší 3 let. Obsahuje kyselinu salicylovou. Zdravotnický prostředek nepřibližujte k očím. Nepoužívejte na poraněnou pokožku. Pokud se u Vás projeví podráždění pokožky, vyhledejte lékaře. Než vystavíte pokožku slunečnímu záření, na místa, kde jste přípravek použili, naneste krém s ochranným faktorem. U méně než 1 % pacientů se může vyskytnout folikulitida. Obsahuje stopové prvky těchto látek: citronelal, kumarin, farnesol, geraniol, limonen a linalol. Někteří pacienti mohou po aplikaci pociťovat mravenčení, pálení nebo svědění. Tyto pocity obvykle ustanou po cca 20 minutách, nepřetrvávají déle. Jestliže se reakce zhorší, přípravek ihned smyjte vodou a mýdlem.

Bezpečnost a skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití přípravku vyhledejte pohotovostní lékařskou službu nejbližší nemocnice. NEVVOLÁVEJTE zvracení. Po každém použití pečlivě uzavřete víčkem. Neskladujte na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Uchovávejte při teplotě do 25 C, ale nezmrazujte.

Vzhled zdravotnického prostředku

SORATINDEX DR. MICHAELS Kondicionér je hustá tekutina, průzračné až neprůhledné barvy, s charakteristickou vůní.

Složení kondicionéru

Deionised Water, Polywax, Cetyl Stearyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Dimethicone, Palm Kernal Oil, Peppermint Essential Oil. Grapeseed Oil. Sodium Hydroxymethyl Glycinate, Vitamin E. Sorbic Acid

Výrobce:

V licenci společnosti Tirsell Pty. Ltd., 374 Nepean Hwy, Frankston, VIC 3199, Austrálie
Vyrobeno v EU pro FRANKL Pharma s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika společnost Biotika Bohemia s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4 Česká republika, email: info@soratindex.cz

Zdravotnický prostředek rizikové třídy 1: Číslo certifikátu výrobce: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydáno společností URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnění 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz, www.urs-certification.co.uk

Soratinex Dr. Michaels Kondicionér

príbalová informácia zdravotníckeho prostriedku



Čo by ste mali vedieť prípravku SORATINEX DR. MICHAELS KONDICIONÉR

Tento príbalový leták informuje užívateľa o prínosoch a možných rizikách pri užívaní SORATINEX DR. MICHAELS KONDICIONÉR. Uschovajte tento letáčik spolu s obalom na neskoršie nahliadnutie. Vždy pozorne čítajte informácie pre použitie a vezmite na vedomie všetky upozornenia. Používajte SORATINEX DR. MICHAELS ŠAMPÓN len do uplynutia vyznačenej doby použiteľnosti dátumu spotreby. Prostriedok nikdy neriedte, ani ich nemiešajte s inými produktmi. Prostriedok nanášajte vždy iba čistými rukami alebo aplikátorom, ktorý je pravidelne starostlivo umytý mydlom alebo jemným čistiacim prostriedkom. Ak na nanášanie prostriedku používate aplikátory, uistite sa, že budú vždy po použití umyté a nechajte ich vždy pred ďalším použitím úplne vysušiť. Prostriedok s nikým iným nezdierajte.

Na čo sa SORATINEX DR. MICHAELS KONDICIONÉR používa?

SORATINEX DR. MICHAELS KONDICIONÉR sa používa na starostlivosť o suchú, odlupujúcu sa a zapálenú pokožku postihnutú lupienkou alebo atopickým exémom vo vlasovej časti a na zmiernenie šupinatena spôsobených lupienkou. Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča používať všetky produkty obsiahnuté v sade SORATINEX DR. MICHAELS SADA NA VLASOVÚ POKOŽKU, teda SORATINEX DR. MICHAELS KRÉM 50G v kombinácii s produktmi SORATINEX DR. MICHAELS ŠAMPÓN a SORATINEX DR. MICHAELS Kondicionér, pretože sa vzájomne dopĺňajú.

Použitie prostriedku

DR. MICHAELS KONDICIONÉR, sa používa v poslednom kroku celej kôry. Hydratuje a chráni ošetrené miesta. Kondicionér jemne vmasírujte do pokožky a nechajte zaschnúť. Potom jemne opláchnite a vlasy vysušte.

Skôr ako začnete prostriedok používať

Skôr ako začnete používať prostriedok SORATINEX DR. MICHAELS KONDICIONÉR, VŽDY pred použitím najskôr vyskúšajte malé množstvo produktu na malej ploche pokožky, ako test na možné reakcie, obzvlášť ak budete produkt používať na citlivých miestach pokožky. Ponechajte na pokožke pôsobiť 24-48 hodín, až potom zmyte. Pokiaľ sa objaví akákoľvek reakcia, prosíme, ihneď kontaktujte výrobcu. Pokiaľ žiadnu reakciu nemáte, aplikujte SORATINEX DR. MICHAELS KONDICIONÉR podľa návodu na použitie.

Dodržujte odporúčanú frekvenciu používania:

Ak budete prostriedok SORATINEX DR. MICHAELS SADA NA VLASOVÚ POKOŽKU používať menej často, než by ste mali, je možné, že nebude mať také dobré účinky a problémy so suchou, odlupujúcou sa a zapálenou pokožkou môžu pretrvávať. Pokiaľ budete používať produkt častejšie, než by ste mali, problémy so suchou, odlupujúcou sa a/alebo zapálenou kožou neustanú rýchlejšie, naopak, pokožku môžete ešte viac podráždiť.

Upozornenie

Nie je určené pre deti mladšie ako 3 roky. Obsahuje kyselinu salicylovú. Zdravotnícky prostriedok nepribližujte k očiam. Nepoužívajte na poranenú pokožku. Pokiaľ sa u Vás prejaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekára. Než vystavíte pokožku slnečnému žiareniu, na miesta, kde ste prípravok použili, naneste krém s ochranným faktorom. U menej ako 1 % pacientov sa môže vyskytnúť folikulitída. Obsahuje stopové prvky týchto látok: citrónelal, kumarín, farnezoľ, geraniol, limonén a linalol. Niektorí pacienti môžu po aplikácii pociťovať mravčenie, pálenie alebo svrbenie. Tieto pocity obvykle prestanú po cca 20 minútach, nepretrvávajú dlhšie. Ak sa reakcia zhorší, prípravok ihneď zmyte vodou a mydlom.

Bezpečnosť a skladovanie

Uchovávajúte mimo dosahu detí. V prípade požitia prípravku vyhľadajte pohotovostnú lekársku službu najbližšej nemocnice. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Po každom použití starostlivo uzavrite viečkom. Neskladujte na priamom slnku ani v blízkosti zdrojov tepla. Uchovávajúte pri teplote do 25 C, ale nezmrazujte.

Vzhľad zdravotníckej pomôcky

SORATINEX DR. MICHAELS Kondicionér je hustá tekutina, priezračné až nepriehľadné farby, s charakteristickou vôňou.

Zloženie kondicionéra

Deionised Water, Polywax, Cetyl Stearyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Dimethicone, Palm Kernal Oil, Peppermint Essential Oil, Grapeseed Oil, Sodium Hydroxymetyl Glycinate, Vitamín E, Sorbic Acid

Výrobca:

V licencií spoločnosti Tinsel Pty. Ltd., 374 Nepean Hwy, Frankston, VIC 3199, Austrália

Vyrobené v EU pre FRANKL Pharma s.r.o., Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5, Česká republika spoločnosťou Biotika Bohemia s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4 Česká republika, email: info@soratinex.cz

Zdravotnícky prostriedok rizikovej triedy I: Číslo certifikátu výrobcu: ISO 13485:2016 200330/A/0001/UK vydané spoločnosťou URS – UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS, člen UKAS číslo oprávnenia 0043, člen IAF, www.urs-czech.cz, www. -certification.cz.uk